

PROCÉDURE D'ENTRETIEN DES MASQUES EN TISSUS LAVABLES

Nettoyage du masque quotidien



1. **Mettre le masque usagé à la machine**, avec une lessive classique, **sans adoucissant**. Le masque peut être lavé avec les autres vêtements du foyer. Il est possible d'ajouter du désinfectant linge (ex : Sanytol linge)



2. **Laver à 60°C** pendant au moins 30 minutes ou
Laver à 40 °C pendant au moins 45 minutes ou
Laver à 30 °C pendant au moins 1 Heure



3. **Sécher le masque dans les 2 heures** qui suivent à l'aide d'un sèche cheveux.

NE PAS METTRE AU SECHE-LINGE



4. **Inspecter le masque avant de le porter** (les lavages successifs peuvent l'user, notamment au niveau des coutures).

Si le masque est abimé, jetez-le.



A ne pas faire



Ne pas faire bouillir son masque pour le nettoyer, cela risquerait d'abimer le tissu.

Ne pas congeler le masque, cela ne suffit pas à détruire l'agent viral.

Un repassage unique ou un passage au sèche-cheveux, ne remplace pas un lavage.